


OMRON

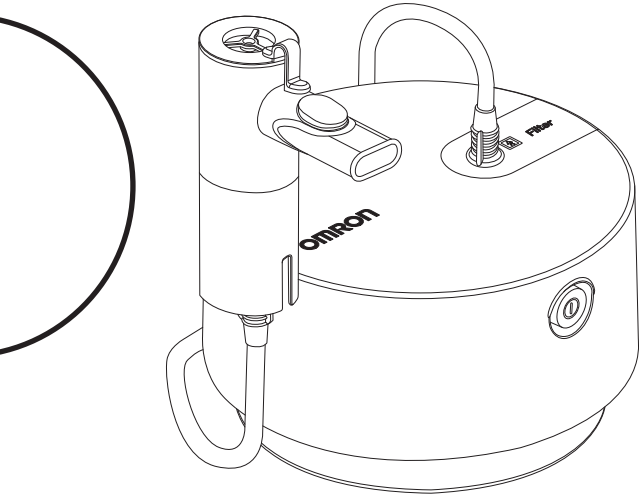

Kompresörlü Nebulizator C28P (NE-C105-E) Kullanım Kılavuzu

EN

FR

DE

IT

ES

NL

RU

TR

AR

İçindekiler

Amaçlanan kullanım.....	143
Nebulizatör kitinin çalışma şekli	144
Gelişmiş Valf Teknolojili (AVT) Nebulizatör Kiti.....	145
Ünitenizi tanıyın.....	146
Önemli güvenlik talimatları	147
Kullanımı	148
Temizleme ve dezenfekte etme.....	152
Hava filtresinin değiştirilmesi	153
Teknik veriler	154
Sorun giderme.....	157
Garanti	158
Opsiyonel Tıbbi Aksesuarlar.....	159
Diğer Opsiyonel/Yedek Parçalar	159

OMRON C28P nebulizatörü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürün astım, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), kronik bronşit, alerjiler ve diğer solunum bozukluklarının başarılı bir şekilde tedavi edilebilmesi için solunum terapistlerinin katkılarıyla geliştirilmiştir. Bu bir tıbbi cihazdır. Bu cihazı yalnızca doktorunuz ve/veya solunum terapistinizin söylediği şekilde kullanın.

Amaçlanan kullanım

Tıbbi Amaçlı Kullanım:

Bu ürün, solunum bozukluklarında kullanılacak bir solunum ilacı olarak tasarlanmıştır. Kompresör birden fazla hastada yeniden kullanılabilir olarak tasarlanmıştır; nebulizatör kiti ve ek parçaları ise tek hastada birden çok kez kullanıma yöneliktir.

Amaçlanan Kullanıcı:

- Doktor, hemşire ve terapist gibi yasal olarak yetkili tıp uzmanları ya da kalifiye tıbbi uzmanlarının yönlendirmesi altındaki sağlık personeli veya hastalar.
- Kullanıcı ayrıca, C28P nebulizatör ile ilgili genel çalışma esaslarını ve bu kullanım kılavuzunun içeriğini anlayabilecek durumda olmalıdır.

Amaçlanan Hastalar:

Solunum bozukluklarından muzdarip olan ve ilaç soluması gereken her yaşta insanlar.

Ortam:

Bu ürün, hastane, klinik, doktor muayenehanesi gibi tıbbi tesislerde ve evde kullanılmak içindir.

Kullanım süresi:


Kullanım süreleri, cihaz günde 3 kez (her defasında 10'ar dakika) oda sıcaklığında (23°C) nebulizasyon için kullanıldığında aşağıdaki gibidir. Dayanıklılık süresi, kullanıldığı ortama göre değişebilir.

Kompresör (Ana ünite):	7,5 yıl
Güç kablosu:	7,5 yıl
Nebulizatör Kiti / Ağızlık / Çocuk Maskesi / Yetişkin Maskesi / Hava Hortumu / Adaptör:	1 yıl
Hava Filtresi:	60 gün

Ürünün sık kullanımı dayanıklılık süresinin kısalmasına neden olabilir.

Nebulizatör kitinin çalışma şekli

İlaç kanalından pompalanan ilaç, kompresörlü pompa tarafından üretilen basınçlı havayla karışır. İlaçlı basınçlı hava karışımı, ince partiküllere dönüştürülür ve buharlaştırıcı kafası üzerinde spray başlığıyla temas ettiğinde püskürtülür.

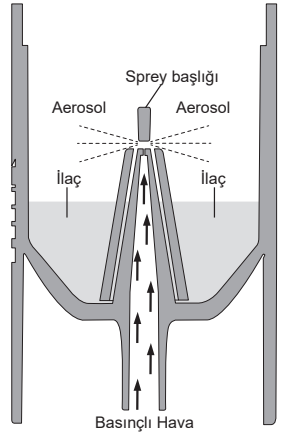

Gelişmiş Valf Teknolojili (AVT) Nebulizatör Kiti

C28P nebulizatör, solumayla ilgili özellikleri geliştirilmiş bir valf sistemi ile donatılmıştır ve hastanın maksimum miktarda ilaç soluyabilmesini sağlar. Soluk alınırken ilaç akışını optimize eder ve soluk verme sırasında ilaç kaybını azaltır.

Aerosol akışının solumayla eş zamanlı hale getirilmesi sayesinde solunan ilacın terapötik etkisi optimize edilir.


Not: Nebulizatörün eş zamanlı işleyişi ancak ağızlığın kullanılmasıyla sağlanabilir!

Soluk alma aşaması

Soluk alma sırasında inhalasyon valfi (A) açılır ve nebulizatöre hava girer.

Bu hava, üretilen aerosol (B) ile karışır ve hasta tarafından ağızlık yoluyla solunur (C).


Bu aşamada ekshalasyon valfi (D) kapalı kalarak aerosol israfını önler.

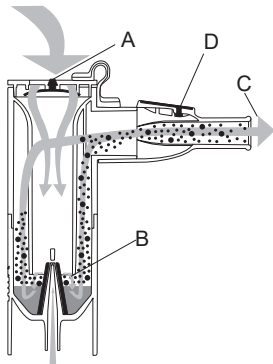

Soluk verme aşaması


Ağızlık yoluyla soluk verilirken, nebulizatörün inhalasyon valfi (A) kapanarak nebulizatörden aerosol çıkışını önler. Üretilen aerosol nebulizatörün içinde kalır ve bir sonraki soluk alma aşaması için kullanılmaya hazır olur.

Soluk verilirken çıkan hava ekshalasyon valfi (D) aracılığıyla ağızlığı terk eder.

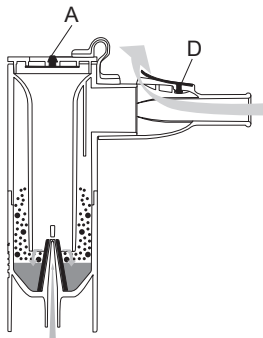


Ünitenizi tanıyın


Kompresör (Ana ünite)

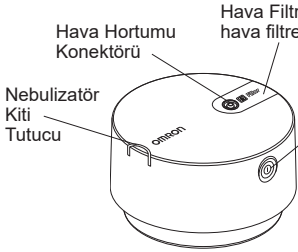


Arkadan Görünüşü

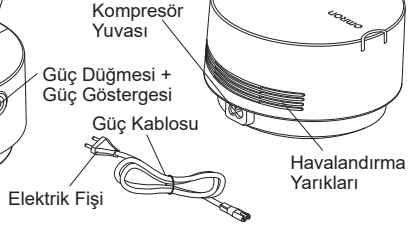

Nebulizatör Kiti

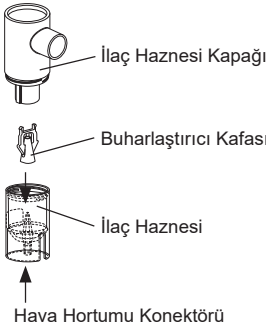

Ağızlık Seti

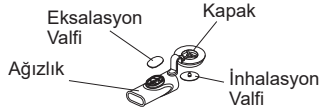

Yetişkin Maskesi (PP+TPE) elastik bant dahil




Çocuk Maskesi için Destek Adaptörü (PP)



Çocuk Maskesi (PP+TPE) elastik bant dahil



Hava Tüpü (PVC, 150 cm)

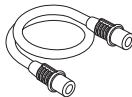

Kullanım kılavuzu

Taşıma Çantası

Yedek Hava Filtreleri x 5

Önemli güvenlik talimatları

 Kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun.

Uyarı:


1. Cihazı yalnızca, tedavi amaçlı solunum cihazı olarak kullanın. Herhangi bir başka kullanım şekli uygun değildir ve tehlikeli olabilir. Üretici, uygun olmayan kullanımlardan sorumlu değildir.
2. Anestezik veya vantilatörlü teneffüs devrelerinde kullanmayın.
3. Kullandıktan sonra ve temizlemeden önce daima elektrik fişini prizden çekin.
4. Kullanım sırasında havalandırma deliklerinin üzerini kapatmayın. Kompresör ısınabilir ve dokunulduğunda yanma riski vardır.
5. Kompresör ve elektrik fişi su geçirmez değildir. Bu parçaların üzerine su veya başka sıvılar dökmeyin. Bu parçalara sıvı dökülürse, derhal elektrik fişini çekin ve sıvıyı silin.
6. Cihazı onarmaya çalışmayın. Bkz. "Sorun giderme" bölümü.
7. Cihazı gözetim altında olmayan bebekler ve çocukların ulaşabilecekleri yerlerde tutmayın. Cihaz, kolayca yutulabilecek küçük parçalar içerebilir.
8. Bu cihaz çocuklar veya yetenekleri sınırlı kişiler tarafından, onların üzerinde veya yakınında kullanıldığında durumu yakından gözleyin.
9. İlacın tipi, dozu ve rejimi hakkında doktorunuz veya solunum terapistinizin verdiği talimatlara uyun.
10. Bu ürün, bilinci açık olmayan veya kendiliğinden soluyamayan hastalarda kullanılmamalıdır.
11. Tedaviyi bitirdikten sonra, hava hortumunu nebulizatör kitinden ve kompresörden ayırmayı unutmayın.
12. Uzunlukları dikkate alındığında, elektrik kablosu ve hava tüpü bir boğulma tehlikesi doğurabilir.
13. Kompresörü, tedavi sırasında elektrik fişine kolaylıkla erişilebilecek bir yerde kullanın.
14. Kullanım sırasında herhangi bir alerjik reaksiyonla veya başka bir rahatsızlıkla karşılaşırsanız cihazı kullanmayı derhal bırakın ve doktorunuza danışın.
15. Bu cihazı kullanırken 30 cm'lik mesafe içinde cep telefonu veya elektromanyetik alanlar yayan diğer herhangi bir elektrikli cihaz bulunmadığından emin olun. Aksi takdirde cihazın performansında azalma olabilir.
16. Kompresörlü nebulizatörde soluma için bitkilerden gelen yağlar, dekoksijenler ve tentürler kullanmayın.
17. Nebulizatör kiti ve ek parçaları tek bir hasta tarafından kullanılacak üzere tasarlanmıştır. Birden fazla hastada kullanmayın ve her hasta için ayrı birer aksesuar kullanın.
18. Parçaları her kullanımdan sonra temizleyin ve normal kullanım sırasında haftada bir kez dezenfekte edin.

Kullanımı

1. Güç düğmesinin KAPALI konumunda bulunduğuundan (güç göstergesi kapalıdır) ve elektrik fişinin prizden çıkarıldığıından emin olun.

2. İlaç haznesi kapağını ilaç haznesinden çıkarın.


- 1) İlaç haznesi kapağını saat yönünün tersine çevirin.
- 2) İlaç haznesi kapağını yukarı kaldırıp ilaç haznesinden çıkarın.

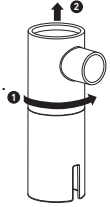


3. İlaç haznesine önerilen miktarda ilaç koyun. Minimum ve maksimum dolum hacimleri ile ilgili talimatlara uyduğunuzdan emin olun (bkz. Teknik veriler). Nebulizatör kitindeki ilaç miktarı çok az veya çok fazla olursa nebulizasyon ve dolayısıyla tedavi performansı büyük ölçüde azalır.



4. Buharlaştırıcı kafasının ilaç haznesi kapağına takıldığıını doğrulayın.

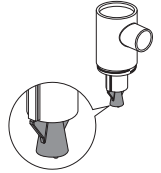


5. İlaç haznesi kapağını ilaç haznesi üzerine geri takın.
1) İlaç haznesi kapağını ilaç haznesi üzerine indirin.
2) İlaç haznesi kapağını saat yönüne çevirin.

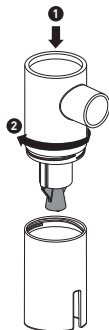


Ağızlığı kullanımı

- 6a. Valflerin gerektiği gibi takıldığından emin olun.
Buradaki çizime başvurun.

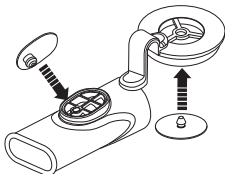

- 6b. Ağızlığı nebulizatör kitine takın ve kapağı bastırarak ilaç haznesi kapağına oturtun.


- 6c. Valf sisteminden en iyi şekilde faydalanmak için hem soluk alırken hem de soluk verirken ağızlığı ağzınızda tutun.

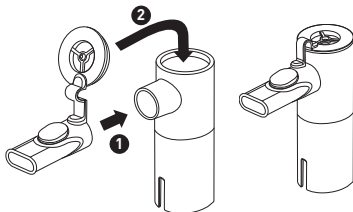

Not: Bebekler veya belirli ihtiyaçları olan hastalar ağızlık yerine maskeyi kullanmalıdır. Maske kullanırken ilaç haznesi kapağındaki kapağın çıkarıldığından emin olun.


⚠ Dikkat:

Ağızlığı nebulizatör kitinden çıkarmak için önce ilaç haznesi kapağındaki kapağın sökülmesi, ardından çekilerek çıkarılması önemlidir. **Bu sırayı tersten uygulamayın!**

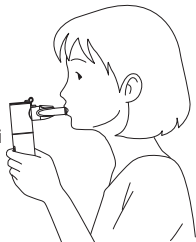


Yetişkin maskesinin kullanımı

6d. Yetişkin maskesini nebulizatör kitine takın.

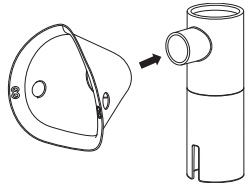


Çocuk maskesinin ve adaptörün kullanımı


6e. Çocuk maskesini destek adaptörüne takın ve bunu da nebulizatör kitine bağlayın.

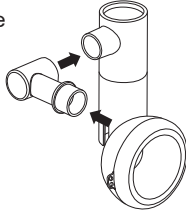

7. Hava hortumu takın. Hava borusu tapasını hafifçe kıvrıyarak hava hortumu konektörüne sıkıca bastırın.

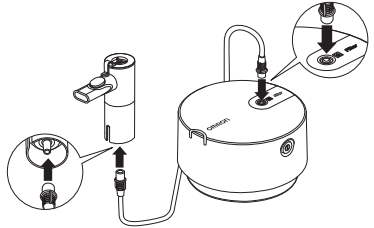

8. Nebulizatör kitini sağda görüldüğü şekilde tutun. Hekiminizin ya da solunum terapistlerinizin talimatlarına uyun.

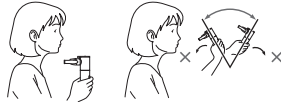

⚠ Dikkat:

Nebulizatör kitini, tüm yönlere doğru 30 dereceden büyük açıyla eğmeyin. İlaç ağzın içine doğru akabilir veya nebulizasyon verimsiz olabilir.

9. Güç kablosunu kompresör yuvasına takın ve ardından elektrik fişini prize takın.

Not: Cihazı güç kablosunun fişini prizden çekmenin zor olduğu bir yere koymayın.

10. Güç düğmesine basarak kompresörü açın, mavi güç göstergesi yanacaktır. Kompresör çalıştığında nebulizasyon başlar ve aerosol üretilir. Ağızlık yoluyla yavaşça soluk alıp verin.

11. Tedavi tamamlandığında cihazı kapatmak için güç düğmesine tekrar basın. Ardından kompresörü elektrik prizinden çıkarın.

Temizleme ve dezenfekte etme

Parçaları temizlerken ya da dezenfekte ederken aşağıdaki kurallara uyun. Bu kurallara uyulmaması hasara, yetersiz nebulizasyona ya da enfeksiyona neden olabilir.

Nebulizatör parçalarını temizlemeden ve dezenfekte etmeden önce ellerinizi dikkatlice yıkayın.

Nebulizatör Kitini, parçalarını ve aksesuarlarını (Maskeler, Ağızlık ve Adaptör) kullanmadan önce aşağıda belirtildiği gibi temizleyin ve dezenfekte edin:

- Satın alındıktan sonra ilk kez kullanmadan önce (temizlik ve dezenfeksiyon)
- Cihaz uzun bir süredir kullanılmadıysa (temizlik ve dezenfeksiyon)
- Her kullanımdan sonra (temizlik)

Parçaları her kullanımdan sonra temizleyin ve normal kullanım sırasında haftada bir kez dezenfekte edin.

● Nebulizatör Kitini, Maskeleri, Ağızlığı ve İlaç Haznesi Adaptörü temizleme:

Nebulizatör kitini tamamen sökün. Parçaları ılık su içerisinde ve yumuşak, nötr deterjan kullanarak yıkayın. Temiz ve sıcak musluk suyunda iyice durulayın ve aşırı suyu almak için hafifçe vurun ve temiz bir ortamda kurumaya bırakın.

● Kompresörü Temizleme:

Elektrik fişinin prizden çıkarıldığından emin olun.

Su veya yumuşak, nötr deterjan ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.

● Hava Tüpünden yoğuşmanın alınması:

Hava tüpünde nem kalırsa aşağıda açıklanan prosedürü uygulayın.

Hava tüpünün kompresöre bağlı olduğundan emin olun. Hava tüpünün nebulizatör kiti ile bağlantısını kesin. Kompresörü açın ve içinden hava geçmesini sağlayarak hava hortumunu kurutun.

● Nebulizatör Kitini, Maskeleri, Ağzıklığı ve İlaç Haznesi Adaptörü dezenfekte etme:

Parçaları haftada bir kez dezenfekte edin. Parçaların yaklaşık 50 dezenfeksiyon döngüsüne dayanması beklenir. Parçalar ağır şekilde kirlenmişse, bunları yenileri ile değiştirin. Nebulizatör Kiti, Maskeler, Ağzıklık ve Adaptör, ürün talimatları doğrultusunda etanol veya sodyum hipoklorit (Milton) gibi bir kimyasal dezenfektan kullanılarak ve temiz ılık suyla durularak dezenfekte edilebilir. Havada kurumaya bırakın.

Not: Asla benzen, tiner veya yanıcı bir kimyasalla temizlemeyin.
(Lateks olmayan) elastik bantlar dezenfekte edilemez.
Maskeleri dezenfekte ederken bunları çıkarın.

● Kaynatma:

Nebulizatör Kiti, Ağzıklık, Maskeler ve Adaptör, bol miktarda suda en az 5 dakika kaynatılarak da dezenfekte edilebilir. Kaynattıktan sonra, parçaları dikkatlice çıkarın, suyun fazlasını sallayarak atın ve temiz bir ortamda kurumaya bırakın.

Not: Hava Hortumunu kaynatmayın.

Hava filtresinin değiştirilmesi

Hava filtresinin rengi değişmişse veya 60 günden uzun bir süre kullanılmışsa filtreyi yenisiyle değiştirin. Filtre satın almak için Diğer Opsiyonel/Yedek Parçalar bölümüne bakın. Hava filtresi kapağını çıkarın. Parmağınızı oluğa takarak hava filtresi kapağını şekilde gösterildiği gibi yukarı çekin.


Filtreyi çıkarın ve yeni filtreyi gösterildiği gibi takın.

Hava filtresi kapağını yerine takın.

Not: Hava filtresini yıkamayın veya temizlemeyin.

Hava filtresi ıslanırsa değiştirin.

Nemli hava filtreleri tıkanmalara yol açabilir

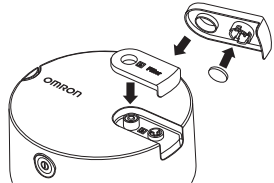

Teknik veriler

Ürün Kategorisi:	Aerosolterapi Ekipmanı
Ürün Açıklaması:	Kompresörlü Nebulizatör
Model (kod):	C28P (NE-C105-E)
Değer:	230V ~50Hz
Güç Tüketimi:	140 VA (70 W)
Çalıştırma Modu:	Kesintisiz Kullanım
Çalışma Sıcaklığı/Nem Oranı/Hava Basıncı:	+5°C ila +40°C / %15 ila %85 BN / 700 ila 1060 hPa
Saklama ve Taşıma Sıcaklığı/Nem Oranı/Hava Basıncı:	-20°C ila +60°C / %5 ila %95 BN / 500 ila 1060 hPa
Sınıflandırmalar:	Tip BF (Uygulamalı parça): Ağızlık ve Maskeler Sınıf II (Elektrik çarpmasına karşı koruma)
IP Sınıfı:	IP21
Kompresörün Ağırlığı:	Yakl. 1,3 kg (yalnızca kompresör)
Kompresörün Boyutları:	Yakl. Ø 180 x 104 (Y) mm
İçindekiler:	Kompresör, AB Fişli Güç Kablosu, Nebulizatör Kiti, Hava Hortumu (150 cm), Ağızlık Seti, Adaptör, Yetişkin Maskesi, Çocuk Maskesi, Taşıma Çantası, 5 adet Yedek Hava Filtresi, Kullanım Kılavuzu
İlaç Sıvısının Tipi:	Çözelti, Süspansiyon
Uygun İlaç Miktarları:	2 ml minimum - 10 ml maksimum
Ses: Gürültü düzeyi (1 m mesafede)	Yakl. 55 dB
Aerosol Çıkışı Hızı**:	Yakl. 0,12 ml/dk.
1 dakikada dışarı verilen dolum hacmi yüzdesi**:	Yakl. %4
Aerosol Çıkışı**:	Yakl. 0,9 ml
Kalıntı hacmi**:	Yakl. 1,1 ml

Partikül Boyutu (MMAD)**: Yakl. 3,5 µm

GSD**:

Yakl. 2,6

Solunabilir fraksiyon

Yakl. %64

< 5 µm**:

Aerosol fraksiyonu

Yakl. %28

< 2 µm**:

2 µm ile 5 µm arası

Yakl. %36

aerosol fraksiyonu**:

Aerosol fraksiyonu

Yakl. %36

> 5 µm**:


MMAD = Aerosol Partikülleri Aerodinamik Çapı









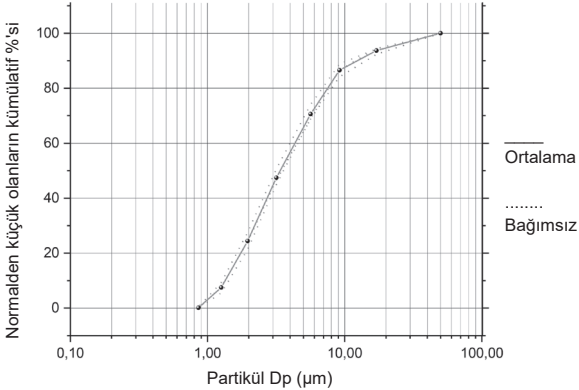






GSD = Geometrik standart sapma

** 3 ml, %0,1 Salbutamol, %0,9 NaCl çözeltisinde.

Partikül boyutu için kademeli ayırıştırıcı ölçüm sonuçları

Normalden küçük kümülatif salbutamol partikül kütle % değeri



Sembol açıklaması			
	Kullanma talimatına bakın		Nem sınırlaması
	Kullanıcının kullanım talimatlarına başvurmasını gerektirir		Atmosferik basınç sınırlaması
	Tatbiki parça - Tıp BF Elektrik çarpmasına karşı koruma derecesi (kaçak akım)		Sıcaklık sınırlaması
	Sınıf II Elektrik çarpmasına karşı koruma		Güç AÇMA/KAPATMA (basmalı tip)
IP XX	Katı cisimlere karşı koruma sınıfı IEC 60529		Alternatif akım
	CE İşareti		Tıbbi Cihaz
	LOT numarası		Üretim Tarihi
	Seri numarası		Benzersiz cihaz tanımlayıcısı

Genel Notlar:

- IP sınıfı koruma derecesi IEC 60529'a uygun muhafazalarla sağlanır. Bu kompresör, 12 mm ve daha büyük çaplı katı yabancı cisimlere (parmak gibi) ve normal çalışma sırasında sorunlara neden olabilecek dikey düşen su damllarına karşı korumalıdır.
- Önceden haber verilmeden teknik değişikliğe tabidir.
- Sıcaklığın ve voltaj koşullarının teknik özellikler bölümünde belirtilenlerden farklı olması halinde, cihaz çalışmayabilir.
- Bu cihaz (kompresör, nebulizatör kiti, hava hortumu, ağızlık seti, çocuk maskesi için destek adaptörü, yetişkin maskesi ve çocuk maskesi), Avrupa Standardı EN ISO 27427:2019 Anestezi ve solunum ekipmanı - Püskürtme sistemleri ve bileşenleri başlıklı standartların hükümlerini karşılar.

- Süspansiyonlar veya yüksek viskoziteli çözeltiler gibi ilaçlarla kullanıldığında nebulizatör performansı değişebilir. Daha ayrıntılı bilgi için tedarikçi firma belgelerine bakın.
- Parçacık boyutu dağılımı ve aerosol çıkışı; ürün, ilaç ve sıcaklık, nem ve atmosfer basıncı gibi ortam koşullarının birleşimine göre farklılık gösterebilir.
- Nebulizatör performansına ilişkin açıklamalar, yetişkin solunum modellerinin kullanıldığı testleri temel almakta olup pediatri veya bebek popülasyonları için belirtilenden farklı olması muhtemeldir.

Sorun giderme

Kullanım sırasında aşağıdaki sorunlardan herhangi birinin meydana gelmesi durumunda ilk olarak 30 cm'lik mesafe içinde başka bir elektrikli cihaz bulunmadığını kontrol edin. Sorun devam ederse aşağıdaki tabloya başvurun.

Cihaz açılmıyor

- Elektrik fişinin prize düzgün bir şekilde takıldığını ve güç kablosunun kompresör yuvasına bağlı olduğunu kontrol edin.
- Güç düğmesinin açık konumunda bulunduğundan emin olun.

Cihaz açılıyor ancak nebulizasyon uygulamıyor

- Buharlaştırıcı kafasının nebulizatör kitindeki ilaç haznesi kapağına takıldığından emin olun.
- Hava hortumunun ezilmediğinden veya bükülmediğinden emin olun.
- Hava filtresinde tıkanma ve kir olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse değiştirin.
- Nebulizatör kitine yeterli miktarda ilaç konduğunu kontrol edin.

Çalışırken cihaz aniden duruyor.

- Termal devre kesici, aşağıdaki sebeplerden biri nedeniyle cihazı kapatmıştır:
 - cihaz, 40°C üzerinde ortam sıcaklıklarında çalışıyordu;
 - havalandırma deliklerinin üzeri kapatılmıştır.

Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihazı açmayın ve/veya kurcalamayın. Cihazda, kullanıcı tarafından bakım yapılabilecek parça bulunmamaktadır. Cihazı yetkili bir OMRON perakende satış mağazasına veya dağıtıcısına iade edin.

Lütfen bu cihazla ilgili olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay hakkında üreticiye ve bulunduğunuz Üye Devletin yetkili otoritesine rapor verin.

Garanti

Bir OMRON ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürünün üretimi büyük bir itina ve üstün kalite malzemeler ile yapılmıştır. Doğru kullanıldığı ve kullanım kılavuzunda verilen talimatlar doğrultusunda bakımı yapıldığı sürece size en üst düzey konforu sunmak üzere tasarlanmıştır. OMRON bu ürün için, satın alınma tarihi ile başlayan 3 yıllık bir garanti sağlar. Bu ürünün üretim, işçilik ve malzeme kalitesi OMRON tarafından garantilidir. Bu garanti süresince OMRON, parça, işçilik, tamir veya sorunlu ürün ve parçaların değişiminde hiç bir bedel almayacaktır. Garanti, aşağıdaki maddelerden herhangi birini kapsamaz:

- a. Nakliye masrafları ve taşıma riski.
- b. Yetkisiz kişilerin yaptığı onarımlardan kaynaklanan kusurların ve/veya onarımların masrafları.
- c. Periyodik olarak yapılan kontroller ve bakımlar.
- d. Yukarıda açıkça garanti edilmedikçe, ana cihazın kendisi dışındaki aksesuar veya diğer ek parça arızaları veya aşınmaları.
- e. Bir talebin reddedilmesi nedeniyle ortaya çıkan masraflar (ücretlendirilecek olanlar).
- f. Kazara veya hatalı kullanım nedeniyle ortaya çıkan kişisel dahil her türlü hasar.

Garanti kapsamında bir hizmete ihtiyacınız olması halinde, ürünü satın aldığınız satıcıya ya da yetkili OMRON bayine başvurun. Adres için, ürün kutusuna, kitapçıklarına veya perakende satıcısına başvurun.

Garanti kapsamındaki onarım veya değişimler garanti süresini uzatmaz veya yenilemez.

Ürünün bütünü, satıcıdan tüketiciye verilen orijinal faturası/fişi ile gönderildiği sürece garanti hizmetleri sunulur. OMRON, verilen bilgilerin açık olmaması halinde garanti hizmetini reddetme hakkını saklı tutar.

Opsiyonel Tıbbi Aksesuarlar

Ürün Açıklaması	Model
Nebulizatör Kiti	NEB6026
Hava Tüpü	NEB6016
Ağızlık Seti (İçindekiler: Kapaklı Ağızlık, Eksalasyon Valfi, İnhalasyon Valfi)	NEB6027
Çocuk Maskesi (elastik bant dahil)	NEB6028
Yetişkin Maskesi (elastik bant dahil)	NEB6029
Çocuk Maskesi için Destek Adaptörü	NEB6030
Burun yıkama kiti	NEB6014

Diğer Opsiyonel/Yedek Parçalar

Ürün Açıklaması	Model
AB Fişli Güç Kablosu	3AC459
UK Fişli Elektrik Kablosu	3AC460
Hava Filtresi Seti (İçindekiler: 5 parça)	3AC458

Elektro Manyetik Uyumluluk (EMC) ile ilgili önemli bilgiler

3A HEALTH CARE S.r.l. tarafından üretilen bu cihaz, EN60601-1-2:2015 Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardına uygundur.



Bu EMC standardına uygun diğer belgeler OMRON HEALTHCARE EUROPE şirketinin bu talimat kılavuzunda belirtilen adresinde veya www.omron-healthcare.com sayfasında mevcuttur.



İMHA PROSEDÜRÜ (Dir. 2012/19/EU-WEEE)

Bu ürüne evsel atık muamelesi yapılmamalı, elektrikli ve elektronik cihazlar için geri dönüşüm atık toplama noktalarına götürülmelidir. Daha fazla bilgi için belediyenize, belediyenizin atık toplama ekiplerine ya da ürünü satın aldığınız bayiye danışın.

TR

İmalatçı firma 	3A Health Care S.r.l. Via Marziale Cerutti, 90F/G 25017 Lonato del Garda (BS), İtalya
Distribütör 	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLANDA www.omron-healthcare.com
Yan Kuruluşlar	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com/distributors
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH / OMRON SANTÉ FRANCE SAS www.omron-healthcare.com/distributors

İtalya'da üretilmiştir